

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU



Profil produktu i instrukcja użytkowania

Pojemnik na mocz – kaczki męskie i damskie (różne pojemności)

Sprzęt Medyczny klasa I
Materiał : Polipropylen

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl



Przeznaczenie

- Pojemnik na mocz – kaczka męska dla dorosłych z zatyczką.
- Pomoc przy obsłudze osób niepełnosprawnych.
- Produkt wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów z urazem lub niepełnosprawnością, zwykle przykutych do łóżka szpitalnego, a także dla pracowników służby zdrowia, pielęgniarek i personelu medycznego.

Cechy produktu

- Mocny i trwały.
- Gwarancja 1000 cykli.
- Łatwy w chwycie uchwyt z zatyczką.
- Można czyścić w automatycznych myjkach dezynfekujących lub myć ręcznie.
- Gładkie krawędzie i powierzchnie.

Informacje o opakowaniu

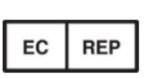
Numer katalogowy	Kod kreskowy opakowania (GTIN 13)	Kolor/ Pojemność	Pojemność	Opakowanie Podstawowe	Opakowanie zbiorcze	Waga
KSM002	5 904384 4870645	Transparentny	1200ml	Worek foliowy 1 x 1	Zgodnie z zamówieniem (max. 120 szt.)	15 kg
KSM003	5 90438 44870652	Transparentny	800ml	„	Zgodnie z zamówieniem (max. 150 szt.)	„
KSD004	5 90438 44870669	Transparentny	600ml	„	Zgodnie z zamówieniem (max. 150 szt.)	„

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Profil produktu i instrukcja użytkowania

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl

Symbole produktu

Producent	Numer katalogowy	Zgodność z przepisami UE	Wyrób medyczny	Autoryzowany przedstawiciel WE	Uwaga	Kod partii	Data przydatności do użycia	Niesteryl-ny	Brak lateksu	Nie używać, jeśli opakowanie nie jest uszkodzone	Przechowywać w suchym miejscu	Chronić przed światłem słonecznym
												

Producent



PPH KAMED-Plus, Solskiego 3, 42-209 Częstochowa, Polska

Telefon: +48 34 3621509 E-mail; kamedlus@gmail.pl, kamedplus@kki.pl

Normy

- Produkt jest zgodny z: rozporządzeniem 2017/745 oraz, w stosownych przypadkach, z wszelkimi innymi odpowiednimi przepisami unijnymi, które przewidują wydanie deklaracji zgodności UE.

Instrukcja użytkowania:

Przechowywanie i obsługa:

- Nie upuszczać.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w czystych i suchych warunkach.
- Przechowywać na półce lub palecie, nie kładąc na podłodze.
- Okres przydatności 36 miesięcy.

Przygotowanie:

- Produkt dostarczany w stanie niesterylnym.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkty.
- Wycofać uszkodzone produkty i zgłosić przełożonemu.
- Przepłukać ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości opakowania.

Produkt dostarczany jako zestaw składający się z:

- Kaczki i zatyczki.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Profil produktu i instrukcja użytkowania

PPH KAMED-Plus,
Sprzęt medyczny z tworzywa sztucznego
42-209 Częstochowa, Solskiego 3
Polska
T: +48 343621509
www.kamedplus.pl
kamedplus@gmail.com, kamedplus@kki.pl

Czyszczenie i dezynfekcja

- Ustawiaj produkty pojedynczo, unikając kontaktu z innymi przedmiotami.
- Ustawiaj produkty tak, aby umożliwić wnikanie i odprowadzanie wody.
- Czyść maszynowo w myjniach dezynfekujących zgodnych z normą ISO 15883.
- Cykl mycia w temperaturze do 126°C. Dezynfekcja w temperaturze do 130°C do 30min.
- Używaj zatwierdzonych detergentów, środków czyszczących enzymatycznych lub biobójczych, odpowiednich do czyszczenia wyrobów medycznych.
- Używaj detergentów i środków dezynfekujących o zakresie pH od 2 do 13.
- Dopuszczalne jest czyszczenie ręczne.
- Płucz czystą wodą.

Inspekcja Konserwacja i Raportowanie Incydentów

- Wizualna inspekcja produktu w celu zidentyfikowania uszkodzeń.
- Wyrzucenie uszkodzonego produktu.
- Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce podczas użytkowania tego produktu, należy zgłaszać producentowi i Właściwemu Organowi na terytorium, na którym znajduje się użytkownik.

Utylizacja

- Koniec okresu użytkowania określa się na podstawie zużycia, kontroli wizualnej lub uszkodzenia produktu.
- Jeśli produkt jest zanieczyszczony, należy traktować go jak odpad kliniczny i utylizować zgodnie z procedurami dotyczącymi odpadów klinicznych.

Uwagi

- Nie należy używać proszków ściernych ani szczotek metalowych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Nie przekraczać temperatury 130°C do 30min.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania

- Informacje dostarczone przez PPH KAMED-Plus stanowią oficjalne instrukcje firmy dotyczące tego produktu.
- Obowiązkiem przetwórcy jest zapewnienie, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z tymi informacjami oraz że personel, maszyny i sprzęt spełniają odpowiednie normy dotyczące przetwarzania.
- Wszelkie odstępstwa od tych informacji wymagają oceny pod kątem skuteczności i potencjalnych negatywnych skutków.
- Dodatkowe informacje dostępne na życzenie, skontaktuj się z nami: kamedplus@gmail.com